


BELANGRIJK: coderen van de samples (klinisch materiaal)

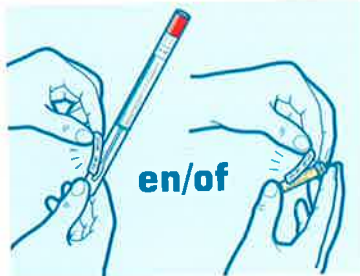

Op de bijgesloten codekaart D bevinden zich 2 codeerstickers die u op de urine-opvangbuis B en/of de wattenstaaf-opvangbuis C moet plakken. Hiermee wordt het testresultaat gekoppeld aan uw inlogcode.

Vergeet dit niet en bewaar uw codekaart met de inlogcode goed zodat u de uitslag via de website kunt opvragen.

Opsturen van de samples

Plaats de urine-opvangbuis B en/of de wattenstaaf-opvangbuis C plus het absorptiemateriaal E in de plastic sealzak F. Haal de zilveren foliestrip van de plakrand en plak het plastic zakje goed dicht. Plaats vervolgens het gevulde plastic zakje terug in de portvrije retourbox G. Plak deze dicht met de ronde sluitzegel die zich op de codekaart D bevindt. De retourbox heeft al een retouradres met antwoordnummer, u hoeft dus GEEN postzegels te plakken op deze retourbox.

Opvragen van uw uitslag

De verzending duurt gemiddeld 2 dagen en de testanalyse duurt 5 werkdagen, inclusief administratieve verwerking.

Na 7 dagen kunt u uw uitslag via de website opvragen:

- Ga naar www.microbiome.nl
- Klik op 'Microbiome thuistesten' en vervolgens op 'uitslag thuistest'
- U kunt vervolgens uw inlogcode intypen in het tekstveld en de testuitslag verschijnt
- Graag bij de verschenen uitslag **op OK klikken** zodat wij weten dat u uw uitslag heeft gezien!



SOA-thuistest

- Houdt de test buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de test niet nadat de houdbaarheidsdatum is overschreden.
- Bewaren bij een temperatuur van 4-28°C.
- Alle componenten zijn voor eenmalig gebruik.

Testing at home is uw specialist op het gebied van thuistesten en zorgt voor continue ontwikkeling van nieuwe testen.

Kijk voor de laatste ontwikkelingen op www.thuistestenbv.nl

Microbiome

Microbiome Ltd.
www.microbiome.nl

Wattenstaafje **STERILE EO**
COPAN, Via F. Perotti 10,
25125 Brescia, Italy

Sealbag **UN3373**
Transposafe Systems Holland BV,
Wattstraat 7a, 2171 TP Sassenheim, NL

Transfer pipette **STERILE EO** **CE**
SARSTEDT AG & Co, Sarstedtstraße,
51582 Nümbrecht, Germany

Microbiome Ltd CT-NG-TV patented test is



In-vitro diagnosticum voor zelfgebruik.



SOA-thuistest

Bijsluiter

Lees deze bijsluiter eerst helemaal goed door voordat u de test gaat uitvoeren.

